




PREPARAZIONE E DISSEZIONE PRECISA E MIRATA
PER I DIVERSI TIPI DI TESSUTO CON
LA MODALITÀ CLASSIC COAG.

2 RECTUM SURGERY			
Guide / progs.	Monopolar receptacle		
Mode AUTO CUT	Mode CLASSIC COAG		
Effect 4	Upmax:430Vp 	Upmax:1430Vp 	Effect 2
max. watts 120			max. watts 50



MODALITÀ CLASSIC COAG.


PER LE ESIGENZE DELLA CHIRURGIA VISCERALE E CARDIACA.

La modalità CLASSIC COAG nel VIO 300 D e nel VIO 300 S, appositamente concepita per queste specializzazioni chirurgiche, è indicata in modo specifico per preparazioni e dissezioni atraumatiche non a contatto. Dopo l'incisione immediata, la modalità CLASSIC COAG si adatta alle mutevoli caratteristiche del tessuto. La ridotta formazione di scintille consente di ridurre al minimo gli effetti di carbonizzazione, nonché i danni termici laterali sui margini di taglio e l'adesione del tessuto all'elettrodo.

Queste caratteristiche destinano la modalità CLASSIC COAG al settore di impiego della chirurgia viscerale e cardiaca, consentendo di ottenere una nuova qualità selettiva durante la preparazione e la dissezione di strati tissutali.



Preparazione dell'arteria mammaria con minimo danneggiamento termico.

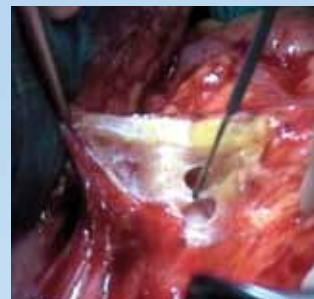

Preparazione selettiva degli strati in caso di resezione del sigma.

I vantaggi:

- ✦ Preparazione e dissezione precisa e strato-specifica
- ✦ Incisione immediata
- ✦ Ridotta formazione di scintille, taglio uniforme indipendentemente dalle caratteristiche del tessuto „senza contatto“ e atraumatico
- ✦ Minimo danno termico laterale sui margini di taglio e sugli strati di tessuto
- ✦ Minima carbonizzazione, minimo effetto di adesione tra elettrodo e tessuto
- ✦ Proprietà di emostasi selettive a seconda del tessuto



La modalità CLASSIC COAG è integrata come modalità standard negli apparecchi VIO 300 D a partire dalla versione 2.2.1 e VIO 300 S a partire dalla versione 2.0.

ERBE Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Germania
Telefono +49 7071 755-0
Telefax +49 7071 755-179
sales@erbe-med.de
www.erbe-med.com

ERBE Italia S.r.l.
Viale Sarca, 336/f
20126 Milano
Italia
Telefono +39 02 6474681
Telefax +39 02 64746830
info@erbe-italia.com
www.erbe-italia.com



ERBE

Perfection for Life